



שיקום שתלים ישנים

- מצגת הסבר -

לשיקום שתל ישן יש לבדוק אם קיים מתומן בחיבור הפנימי של השתל.

לבדוק עם פרוב בחיבור הפנימי של השתל אם קיים מתומן (OCTAGON).



קיים מתומן

שנת יצור: משנת 1999 ועד היום

חלקים מתאימים:

קטלוג 2017 לשתל Tissue Level



לא קיים מתומן

שנת יצור: לפני 1998

חלקים מתאימים:

קטלוג CLASSIC - פירוט בשקופיות הבאות

- Manufactured from 1989 to 1998
- **Indication:** This implant type was used for screw-retained or cemented crowns, bridges, and telescopic and bar solutions.
- The following articles are required to restore this implant type with prosthetic components:



Restoration for fixed, cemented crowns and bridges

- Solid abutment (Article according to current Straumann® Product Catalog)
- Angled abutments

Art. No.		Article	Material
048.483C		Abutment, angled 15°	Titanium
048.484C		Abutment, angled 20°	Titanium

Restoration for fixed, screw-retained crowns and bridges

048.404C		Octa abutment, H 1.5 mm	Titanium
----------	---	-------------------------	----------

For screw-retained repeat restorations, one impression set is required per implant.

040.922C Classic Set, Octa type



Octa impression cap

Aluminum



RN implant analog

Stainless steel



SCS guide screw

Titanium

חיבור פנימי ללא מתומן

שנת יצור: לפני 1998

עבודה מוברגת / מודבקת

קטלוג CLASSIC

לצפייה בקטלוג השלם

לחץ כאן

	RN (Regular Neck) Ø 4.8 mm	WN (Wide Neck) Ø 6.5 mm
Transfer parts	 048.017V4 For non-modified Solid abutments  048.060/061/062V4	 048.017V4 For modified Solid abutments  048.065/066
Analogs	 048.160/161/162  048.117V4	 048.165/166  048.140
Prosthetic restoration	cement-retained	

חיבור פנימי ללא מתומן

שנת יצור: לפני 1998

קטלוג CLASSIC

עבודה מודבקת

Abutments	 048.540	 048.541	 048.542	 048.545	 048.546	
Temporary restoration/ protective caps	 048.654**/655*	 048.047/048/049V4	 048.656**/657*	 048.051/052		
Plastic copings	 **048.246 for bridge	 •048.245 for crown	 **048.248 for bridge	 •048.247 for crown		

■ Parts for the dentist

■ Parts for the dental technician

• Crown

•• Bridge



לשאלות נוספות:

03-6138777

ג'ואן טול